

Cupral®

osvědčen v endodoncii a v parodontologii

- úspěšné vyléčení i bez antibiotik
- selektivní rozložení epitelu parodontálních chobotů za tvorby ochranné membrány
- redukce choroboplodných zárodků s dlouhodobým účinkem stabilizací hodnoty pH
- širokospektré terapeutikum bez vzniku rezistence, ověřeno mnohaletou praxí



Obsažené látky :

hydroxid vápenatý-vysoce disperzní, síran měďnatý, síran vápenatý, hydroxid měďnatý, metylcelulóza, destilovaná voda

Použití v endodoncii:

Nepřímé překrytí pulpy:
Pasta se nanese v tenké vrstvě na dno kavity. Poté se lehce osuší teplým vzduchem. Následně se beztlakově aplikuje podložka.

Dočasná vložka při ošetření kořenových kanálků Depothoresou® i bez ní:

Lentulí aplikovat do kořenového kanálku. Pro Depothoresu® je třeba Cupral® naředit dest. vodou do smetanové konzistence.

Použití v parodontologii:

V praxi jsou odzkoušeny různé možnosti použití Cupralu®, které se vyznačují jednoduchou a individuálně přizpůsobivou manipulací.

Nejčastěji se Cupral® aplikuje špachtlí nebo přímo dávkovací stříkačkou. Při znatelné tvorbě chobotů lze zavést Cupralem® napuštěné bavlněné vlákno přímo do parodontálního chobotu.

Choboty je rovněž možné tamponovat Cupralem® napuštěnou houbičkou nebo pastu do chobotu aplikovat štetčkem.

5 g	15 g	1,8 g stříkačka
670,- Kč	1.307,- Kč	800,- Kč
Zaváděcí cena	Zaváděcí cena	Zaváděcí cena

Cupral® liquid...

... výplachový roztok

- efektivní výplach
- účinný v kanálku a v chobotu
- spolehlivá stabilizace pH
- bez antibiotik a CHX

Použití:

Cupral® liquid před upotřebením důkladně protřepat. Poté stříkačkou nabrat požadované množství přípravku (skrz otvor v hrdle lahvičky) a aplikovat do kořenového kanálku nebo chobotu. Následně se tekutina odsaje.



100 ml
800,- Kč
Zaváděcí cena



HUMANCHEMIE
Kompetence ve výzkumu a praxi

Výrobce:

Humanchemie GmbH · Hinter dem Krüge 5 · DE-31061 Alfeld, Německo
Telefon +49 (0) 51 81 - 2 46 33 · Telefax +49 (0) 51 81 - 8 12 26
E-Mail info@humanchemie.de · www.humanchemie.de

Hämostatikum Al-Cu

*zastavuje krvácení,
redukuje choroboplodné zárodky*

- trvale zastavuje krvácení sliznice, gingivy a pulpy
- odstranění zubního kamene s čistým pracovním polem bez krvácení
- redukuje nebezpečí pronikání choroboplodných zárodků do organismu
- snižuje nebezpečí bakteriémie
- bezproblémový kontakt s otiskovacími materiály



670,- ^{Kč}

Zaváděcí cena

Obsažené látky:

chlorid hlinitý, chlorid měďnatý, destilovaná voda

Spojitosť medzi zánětů v dutině ústní a různými sekundárními onemocněními (onemocnění srdce a krevního oběhu, Diabetes mellitus...) je dlouho známá. Již nepatrné poranění gingivy nebo mucosa, např. při odstranění zubního kamene nebo během profesionálního čištění zubů, mohou vést k zanesení bakterií a tím k bakteriímii. Účinnou ochranu proti zanesení bakterií nabízí Hämostatikum Al-Cu. Působí vlivem koagulace a rychle zastavuje krvácení gingivy, sliznice a pulpy. Okamžitý účinek způsobují malé, rychle difundující anionty soli hlinitku a mědi. Působí adstringentně a přisun iontů mědi redukuje chroboplodné zárodky, čímž se znatelně snižuje riziko bakteriémie.

Vodnatý roztok se lehkým tlakem aplikuje, v závislosti na klinickém případě, buď vatovým tamponem nebo papírovou špičkou na krvácející místo. Hämostatikum Al-Cu má velmi řídkou konzistenci, proto s ním lze ošetřit i obtížně dostupné mezizubní prostory. Zastavení krvácení je trvalé a již nedochází k jeho opětovnému spuštění. Tím je umožněno čisté odstranění zubního kamene bez krvácení, ale i bezproblémový kontakt s otiskovacími materiály. U rizikových pacientů se doporučuje v rámci profesionálního čištění zubů - před vypláchnutím - krátká aplikace Hämostatika Al-Cu, aby se zastavilo drobné krvácení.

dentalTRADING
Váš kompetentní partner

Distributor v České republice:

DENTAL-TRADING spol. s r.o.
Puklicova 52 • 370 04 České Budějovice
Tel.: 386 461 451 • E-mail: info@dentaltrading.cz
www.dentaltrading.cz